


## Montagevejledning ErgoRamp gummiramper / handicapramper

Tilpasning af ErgoRamp kan udføres ved hjælp af simple værktøjer som f.x. håndsav, stiksav eller stanleykniv. Arbejdet forudsætter almindelig omtanke/håndelag.

Efter opmåling bortskares eller bortsaves det nødvendige materiale som nedenvist.

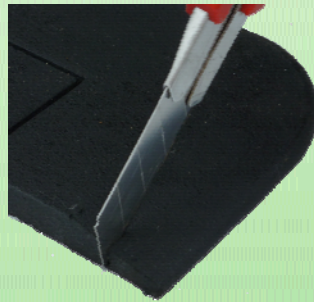

ErgoRamp kan efter behov limes til underlaget. Til fastlimning udendørs anbefaler vi anvendelse af Danalim 524 Fugelim eller tilsvarende produkt.


Indendørs kan der med fordel anvendes dobbeltklæbende tape til evt. fiksering af ErgoRamp.



Højde (tykkelse) og længde for både standardramper og specialramper kan tilpasses ved afkorting af længden.

Alle standardramper er forsynet med praktiske skæreriller på undersiden. Afstanden mellem disse er 40 mm.

Sammenhængen mellem højde og længde ved afkorting i step a 40 mm fremgår af omstående produktoversigt

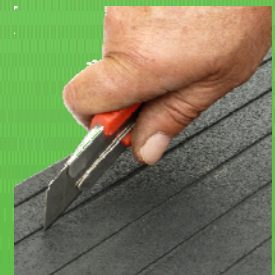

**Sikre miljørigtige løsninger udført af genbrugsgummi**